

# Reinigungs- und Desinfektionsplan

## SR RWS OP

Grundlagen .....	1
Produkte .....	1
<a href="#">Feuchttuchspendersystem Schülke wipes safe &amp; easy</a> .....	3
Absaugereinheit .....	4
Gefrierschrank .....	4
Kühlschrank .....	4
Lagerungsmaterial OP .....	5
Medikamentenschrank .....	5
Medizintechnische Geräte OP/Anästhesie .....	6
OP-Tisch .....	6
Röntgenschürze OP/Endoskopie .....	6
Schränke/Ablagen OP .....	7
Spender .....	7
Tastatur OP .....	7
Telefon OP .....	8
Verbandwagen .....	8
Wärmeschrank .....	9

# Grundlagen

## Inhaltlich

- Basis dieses Dokumentes sind die [Grundlagen/Prinzipien der Mindestanforderungen zur Flächenreinigung/-desinfektion](#).
- Dieser Plan regelt die Periodik der Reinigung/Desinfektion von Gegenständen und Flächen.
- Bei der turnusmässigen Reinigung/Desinfektion von Materialenschränken erfolgt die Kontrolle der Materialien (Verfalldatum, korrekte Verpackung). Die Verantwortung für die Kontrollen liegt bei den Abteilungs-/Bereichsleitungen und müssen individuell festgelegt werden. [Vorlage Jahresplan](#)
- Die routinemässige Reinigung erfolgt durch den Reinigungsdienst.
- Unter "nach Gebrauch" wird die Beendigung der Tätigkeit (z.B. Wiegen aller Patienten) oder das Ende des patientenbezogenen Einsatzes verstanden.
- Für die Reinigung/Desinfektion von speziellen Geräten aus Spezialbereichen siehe: [Aufbereitung spezielle Geräte](#)

## Fachlich

- Bei Kontamination mit Körpersekret (Blut, Schweiss, Stuhl, Erbrochenem, Wundsekret) erfolgt zusätzlich eine zeitnahe gezielte Desinfektion bzw. bei optischer Verschmutzung eine gezielte Reinigung.
- Die [Standardhygienemassnahmen](#) sind Grundlage der täglichen Arbeit und sind nicht Bestandteil dieses Dokumentes.
- Bei Isolationen gelten die Massnahmen in den entsprechenden Richtlinien.
- Bei der Herstellung der Flächendesinfektionsmittellösung mit dem Dosiergerät ist auf korrekte Herstellung (z.B. auf korrekte Mindestmenge) zu achten.
- Beim Gebrauch von Flächendesinfektionsmittel sollen zum Eigenschutz Handschuhe getragen werden.
- Störende Schlieren durch abgetrocknete Flächendesinfektionsmittel können mit einem sauberen trockenen Tuch abgerieben werden.
- Die wiederverwendbaren Flaschen für Allzweckreiniger werden vom Pflegedienst im sauberen (mit Wasser gründlich ausgespülten) Zustand an den Reinigungsdienst zum Wiederbefüllen retourniert.
- Die Reinigung erfolgt mit einem angefeuchtetem (nicht tropfenden) Tuch ohne Nachtrocknung







# Produkte

Details siehe: [Desinfektionsmittel SR RWS](#)

Bezeichnung	Produkt/Herstellung	Wechselintervall/Haltbarkeit
Allzweckreiniger	Suma® Multi D2 5 ml auf 1 Liter kaltes Wasser	Lösung und Lappen wechseln bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschmutzung</li> <li>• nach max. 24 Stunden</li> </ul>
Flächendesinfektionsmittel	Terralin® protect 0,5% direkt aus Dosiergerät 2% bei Norovirusinfektion ( <a href="#">Umstellung Dosiergerät</a> )	Lösung wechseln bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschmutzung</li> <li>• nach max. 24 Stunden</li> </ul> Lappen nach einmaligen Gebrauch nicht wieder in Eimer zurückgeben
	Terralin® protect 0,5% getränkte Wipes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standzeit max. 28 Tage,</li> <li>• siehe <a href="#">„Feuchttuchspendersystem“</a></li> </ul>
	mikrozid® universal wipes (vorgetränkte Tücher)	Nach Anbruch 1 Monat haltbar

Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	mikrozid® sensitive wipes (vorgetränkte Tücher)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nach Anbruch 3 Monate haltbar</li><li>• Nachfüllbeutel aufschneiden und komplett in Box stellen</li><li>• Kleinen Aufkleber von Beutel mit Chargennummer und Verfalldatum auf Box aufkleben</li></ul>
Tauchbad	gigasept® AF 4% z.B. 960ml H2O + 40 ml gigasept® AF	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standzeit max. 7 Tage</li></ul>

## Feuchttuchspendersystem Schülke wipes safe & easy

Anwendung		Desinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen bei einer Kontamination mit Körpersekret
Haltbarkeit		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälter muss die ganze Zeit gut verschlossen sein</li> <li>• Max. 28 Tage nach der Befüllung</li> <li>• Nach Erreichen des Ablaufdatums oder Nutzung des letzten Tuches ist der Behälter gemäss untenstehender Anleitung aufzubereiten</li> </ul>
Erstbefüllung		<a href="#">Anleitungsvideo</a>
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsfläche desinfizieren mit <b>Terralin® protect 0,5 %</b></li> <li>• Zum Schutz der Vliesrolle vor Kontaminationen unsterile Handschuhe anziehen</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnen des selbsthaftenden Siegeletikettes</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siegeletikett auf die dafür vorgesehene Seite der Spenderbox kleben</li> <li>• Vollständiges Ausfüllen des Siegeledikettes</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• innerstes Tuch der Rolle ein Stück herausziehen</li> <li>• 2.5 Liter <b>Terralin® protect 0,5 %</b> aus dem Dosierapparat langsam spiralförmig über die Fliesrolle im Bag giessen</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckel auf Bagöffnung setzen und innerstes Tuch der Vliesrolle durch sternenförmige Entnahmeöffnung des Verschlusses ziehen</li> <li>• anschliessend wird der Verschluss mit dem Bag verschraubt</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag in die Spenderbox einsetzen und Deckel auf der Spenderbox befestigen</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach 30 Minuten sind die Tücher vollständig durchtränkt</li> <li>• Verwerfen des ersten Tuches</li> </ul>
Wiederbefüllung		
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlies- und Flüssigkeitsreste entsorgen</li> </ul>

2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wischdesinfektion aller Oberflächen mit <b>Terralin® protect 0,5 %</b></li> <li>• Alle Oberflächen und Deckel müssen benetzt sein</li> <li>• Einwirkzeit von 30 Sekunden beachten</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach aufrocknen Desinfektionsmittel auf allen Oberflächen Spender mit neuer Vliesrolle und frisch Desinfektionsmittellösung gemäss Erstbefüllung bestücken</li> </ul>

## Absaugeinheit

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Aussen	Nach Gebrauch	Flächen-desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren	X	
Beutel (Einweg)	Patientenwechsel (max. Standzeit 3 Tage)		Entsorgen im Hausmüll	X	
Behälter (Mehrweg)	Nach Gebrauch	Flächen-desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren	X	

Details siehe: [Absaugen von Atemwegsekreten/Spülflüssigkeiten](#)

## Gefrierschrank

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Gefrierschrank	Bei Verschmutzung	Allzweckreiniger	Reinigen, Abtauen bei Bedarf	X	
Temperaturkontrolle	Täglich		Kontrollliste visieren	X	

## Kühlschrank

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Lebensmittel*	1 x monatlich	Allzweckreiniger	Reinigen, Abtauen bei Bedarf	Kontrollliste visieren	X	
Temperaturkontrolle	Täglich			Kontrollliste visieren	X	
Medikamente	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen, Abtauen bei Bedarf	Kontrollliste visieren	X	
Temperaturkontrolle	Täglich			Kontrollliste visieren	X	

\* Details siehe: [Umgang mit Lebensmittel ausserhalb Spitalküche](#)

## Lagerungsmaterial OP

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
z.B.	Nach Gebrauch	plastifizierte, nicht waschbare Anzüge mit Flächendesinfektionsmittel	Wischdesinfizieren	X	

## Medikamentenschrank

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Verfalldaten- und Chargenkontrolle	1 x monatlich			Kontrollliste visieren	X	

## Medizintechnische Geräte OP/Anästhesie

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Sämtliche medizintech. Geräte	Nach Gebrauch	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	Wischdesinfizieren		X	
Sämtliche medizintech. Geräte, inkl. Kontrolle (STK, Vollständigkeit, Funktion)	2 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

## OP-Tisch

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Liegefläche und kontaminierte Flächen	nach Gebrauch	Flächen-desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren		X	
ganzer OP-Tisch	1 x wöchentlich	Allzweckreiniger	gründlich reinigen		X	

## Röntgenschürze OP/Endoskopie

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O

Schürze	Bei Verschmutzung	Flächen- desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren	X	
Schürze	1 x monatlich	Allzweckreiniger	Gründlich reinigen		X

## Schränke/Ablagen OP

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Schränke Vorbereitungsraum innen	2 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Schränke OP innen	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Sterilgutschrank/-ablage	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Materialschränke	2 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Büroschränke	1 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

## Spender

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Handseife, Creme, Händedesinfektionsmittel	1 x täglich	Allzweckreiniger	Äusserlich reinigen			X
	Bei Pumpenstörung	Warmes Wasser	Pumpenkopf ausbauen und durchspülen			X



## Tastatur OP

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Tastatur OP-Saal	nach Gebrauch	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	Wischdesinfizieren wird keine optische Sauberkeit erreicht --> ersetzen der Tastatur	X	
Tastatur Büro	1 x täglich	Allzweckreiniger	Reinigen wird keine optische Sauberkeit erreicht --> ersetzen der Tastatur	X	

Details siehe: [Tastaturen/Touchscreen Flächen in Patientenbereichen](#)

## Telefon OP

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Tischtelefon OP-Saal	nach OP	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	Wischdesinfizieren wird keine optische Sauberkeit erreicht --> ersetzen des Telefons		X
Schnurlostelefon OP-Saal	1 x täglich oder bei Dienstwechsel	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	Wischdesinfizieren wird keine optische Sauberkeit erreicht --> ersetzen des Telefons	X	
Tischtelefon Büro	1 x täglich	Allzweckreiniger	Reinigen wird keine optische Sauberkeit erreicht --> ersetzen des Telefons	X	

## Verbandwagen

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Arbeitsfläche	Nach Gebrauch	Flächen-desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren		X	
Ganzer Wagen Inkl. Verfalldaten- und Chargenkontrolle	1 x monatlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

## Wärmeschrank

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Wärmeschrank	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

Verantwortlicher Autor: André Riedel  
 Erstellt am: 15.10.2014  
 Letzte Änderung: 21.09.2018  
 Publierte Version: 2.0.0  
 Gültig für: **Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland**  
 (validiert am **15.08.2016** durch **Matthias Schlegel**)