

Reinigungs- und Desinfektionsplan

SR RWS Anästhesie/Aufwachraum

Grundlagen	1
Produkte	1
Feuchttuchspendersystem Schülke wipes safe & easy	3
Absaugereinheit Anästhesie/Endoskopie	4
Ambubeutel inkl. Maske	4
Anästhesiewagen Anästhesie	5
Blutdruckmanschette Anästhesie	5
Boy	6
Hämoglobinbestimmung	6
Infusionsständer	6
Inhalationsset	6
Kühlkompressen/Coldpack	7
Kühlschrank Anästhesie	7
Medikamentenschrank	8
Medizintechnische Geräte OP/Anästhesie	8
Nierenschale	8
Notfallrucksack/-Schublade	9
Paravan (Trennwand)	9
Schränke Anästhesie	9
Spender	10
Stauschlauch	10
Stethoskop	10
Tastatur	11
Telefon	11
Temperatursonde	11
Thermometer	12

Reinigungs- und Desinfektionsplan SR RWS Anästhesie/Aufwachraum

Ultraschall	12
Wärmeschrank	12
Wäscheschrank	13

Grundlagen

Inhaltlich

- Basis dieses Dokumentes sind die [Grundlagen/Prinzipien der Mindestanforderungen zur Flächenreinigung/-desinfektion](#).
- Dieser Plan regelt die Periodik der Reinigung/Desinfektion von Gegenständen und Flächen.
- Bei der turnusmässigen Reinigung/Desinfektion von Materialenschränken erfolgt die Kontrolle der Materialien (Verfalldatum, korrekte Verpackung). Die Verantwortung für die Kontrollen liegt bei den Abteilungs-/Bereichsleitungen und müssen individuell festgelegt werden. [Vorlage Jahresplan](#)
- Die routinemässige Reinigung erfolgt durch den Reinigungsdienst.
- Unter "nach Gebrauch" wird die Beendigung der Tätigkeit (z.B. Wiegen aller Patienten) oder das Ende des patientenbezogenen Einsatzes verstanden.
- Für die Reinigung/Desinfektion von speziellen Geräten aus Spezialbereichen siehe: [Aufbereitung spezielle Geräte](#)

Fachlich

- Bei Kontamination mit Körpersekret (Blut, Sch weiss, Stuhl, Erbrochenem, Wundsekret) erfolgt zusätzlich eine zeitnahe gezielte Desinfektion bzw. bei optischer Verschmutzung eine gezielte Reinigung.
- Die [Standardhygienemassnahmen](#) sind Grundlage der täglichen Arbeit und sind nicht Bestandteil dieses Dokumentes.
- Bei Isolationen gelten die Massnahmen in den entsprechenden Richtlinien.
- Bei der Herstellung der Flächendesinfektionsmittellösung mit dem Dosiergerät ist auf korrekte Herstellung (z.B. auf korrekte Mindestmenge) zu achten.
- Beim Gebrauch von Flächendesinfektionsmittel sollen zum Eigenschutz Handschuhe getragen werden.
- Störende Schlieren durch abgetrocknete Flächendesinfektionsmittel können mit einem sauberen trockenen Tuch abgerieben werden.
- Die wiederverwendbaren Flaschen für Allzweckreiniger werden vom Pflegedienst im sauberen (mit Wasser gründlich ausgespülten) Zustand an den Reinigungsdienst zum Wiederbefüllen retourniert.
- Die Reinigung erfolgt mit einem angefeuchtetem (nicht tropfenden) Tuch ohne Nachtrocknung







Produkte

Details siehe: [Desinfektionsmittel SR RWS](#)

Bezeichnung	Produkt/Herstellung	Wechselintervall/Haltbarkeit
Allzweckreiniger	Suma® Multi D2 5 ml auf 1 Liter kaltes Wasser	Lösung und Lappen wechseln bei: <ul style="list-style-type: none"> • Verschmutzung • nach max. 24 Stunden
Flächendesinfektionsmittel	Terralin® protect 0,5% direkt aus Dosiergerät 2% bei Norovirusinfektion (Umstellung Dosiergerät)	Lösung wechseln bei: <ul style="list-style-type: none"> • Verschmutzung • nach max. 24 Stunden Lappen nach einmaligen Gebrauch nicht wieder in Eimer zurückgeben
	Terralin® protect 0,5% getränkte Wipes	<ul style="list-style-type: none"> • Standzeit max. 28 Tage, • siehe „Feuchttuchspendersystem“
	mikrozid® universal wipes (vorgetränkte Tücher)	Nach Anbruch 1 Monat haltbar

Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	mikrozid® sensitive wipes (vorgetränkte Tücher)	<ul style="list-style-type: none">• Nach Anbruch 3 Monate haltbar• Nachfüllbeutel aufschneiden und komplett in Box stellen• Kleinen Aufkleber von Beutel mit Chargennummer und Verfalldatum auf Box aufkleben
Tauchbad	gigasept® AF 4% z.B. 960ml H2O + 40 ml gigasept® AF	<ul style="list-style-type: none">• Standzeit max. 7 Tage

Feuchttuchspendersystem Schülke wipes safe & easy

Anwendung		Desinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen bei einer Kontamination mit Körpersekret
Haltbarkeit		<ul style="list-style-type: none"> • Behälter muss die ganze Zeit gut verschlossen sein • Max. 28 Tage nach der Befüllung • Nach Erreichen des Ablaufdatums oder Nutzung des letzten Tuches ist der Behälter gemäss untenstehender Anleitung aufzubereiten
Erstbefüllung		Anleitungsvideo
1.		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsfläche desinfizieren mit Terralin® protect 0,5 % • Zum Schutz der Vliesrolle vor Kontaminationen unsterile Handschuhe anziehen
2.		<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen des selbsthaftenden Siegeletikettes
3.		<ul style="list-style-type: none"> • Siegeletikett auf die dafür vorgesehene Seite der Spenderbox kleben • Vollständiges Ausfüllen des Siegeledikettes
4.		<ul style="list-style-type: none"> • innerstes Tuch der Rolle ein Stück herausziehen • 2.5 Liter Terralin® protect 0,5 % aus dem Dosierapparat langsam spiralförmig über die Fliesrolle im Bag giessen
5.		<ul style="list-style-type: none"> • Deckel auf Bagöffnung setzen und innerstes Tuch der Vliesrolle durch sternenförmige Entnahmeöffnung des Verschlusses ziehen • anschliessend wird der Verschluss mit dem Bag verschraubt
6.		<ul style="list-style-type: none"> • Bag in die Spenderbox einsetzen und Deckel auf der Spenderbox befestigen
7.		<ul style="list-style-type: none"> • Nach 30 Minuten sind die Tücher vollständig durchtränkt • Verwerfen des ersten Tuches
Wiederbefüllung		
1.		<ul style="list-style-type: none"> • Vlies- und Flüssigkeitsreste entsorgen

2.		<ul style="list-style-type: none"> • Wischdesinfektion aller Oberflächen mit Terralin® protect 0,5 % • Alle Oberflächen und Deckel müssen benetzt sein • Einwirkzeit von 30 Sekunden beachten
3.		<ul style="list-style-type: none"> • Nach aufrocknen Desinfektionsmittel auf allen Oberflächen Spender mit neuer Vliesrolle und frisch Desinfektionsmittellösung gemäss Erstbefüllung bestücken

Absaugereinheit Anästhesie/Endoskopie

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Aussen	1 x täglich	Flächen-desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren	X	
Beutel (Einweg)	Beutel 2/3 voll (max. Standzeit 3 Tage) OP: nach Ende Tagesprogramm		Entsorgen im Hausmüll	X	
Behälter (Mehrweg)	1 x täglich	Flächendesinfektion oder Endoskopiewaschmaschine (max. 60°C)	Wischdesinfizieren Thermische Desinfektion	X	
Schlauch	1 x tgl		Entsorgen im Hausmüll	X	

Details siehe: [Absaugen von Atemwegsekreten/Spülflüssigkeiten](#)

Ambubeutel inkl. Maske

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O

Mehrweg	Nach Gebrauch mit Filter	Flächen-desinfektionsmittel	Wischdesinfizieren, anschliessend unter Wasser abspülen und trocknen lassen Filter wechseln	X	
	Nach Gebrauch ohne Filter	Steckbeckenautomat (Topfmaschine)	Thermische Desinfektion	X	
Einweg	Nach Gebrauch		Entsorgen im Hausmüll inkl. Filter	X	

Anästhesiewagen Anästhesie

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Anästhesie-, Kinder-, regionale Wagen Inkl. Verfalldaten- und Chargenkontrolle inkl. Aussenbereiche (Notfall, Gebärsaal)	Nach Gebrauch: Flächen/Wagen Monitore u.ä.	Flächen-desinfektionsmittel Desinfektionsmittel für medizintechnische Geräte	Wischdesinfizieren		X	
	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

Blutdruckmanschette Anästhesie

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Manschette	nach Gebrauch	Flächen-desinfektionsmittel oder Steckbeckenautomat (Topfmaschine)	Wischdesinfizieren Thermische Desinfektion		X	

Boy

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Boy	Nach Gebrauch	Allzweckreiniger	Reinigen	X	
Ganzer Boy inkl. Räder	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	X	

Hämoglobinbestimmung

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Gerät	Nach Gebrauch	Allzweckreiniger	Reinigen	X	

Infusionsständer

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Inkl. Haken	Nach Gebrauch	Allzweckreiniger	Reinigen	X	
Inkl. Räder	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Gründlich reinigen	Kontrollliste visieren	X

Inhalationsset

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Gerät und Set	Nach Gebrauch	Warmwasser	Inhalierset in Einzelteile zerlegen Heiss ausspülen, trocknen	X	
	Patientenwechsel oder nicht entfernbarer Verschmutzung	Allzweckreiniger	Gerät reinigen, Einwegmaterialien im Hausmüll entsorgen	X	

Details siehe: [Atemtherapiegeräte](#)

Kühlkompressen/Coldpack

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Mehrweg (Immer Schutzbezug verwenden)	Nach Gebrauch	Allzweckreiniger	Reinigen Schutzbezug in Wäscherei geben	X	
Einweg	Nach Gebrauch		Entsorgung im Hausmüll	X	

Kühlschrank Anästhesie

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Medikamente	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen, Abtauen bei Bedarf	Kontrollliste visieren	X
Temperaturkontrolle	Täglich			Kontrollliste visieren	X

Medikamentenschrank

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Verfalldaten- und Chargenkontrolle	1 x monatlich			Kontrollliste visieren	X	

Medizintechnische Geräte OP/Anästhesie

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Sämtliche medizintech. Geräte	Nach Gebrauch	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	Wischdesinfizieren		X	
Sämtliche medizintech. Geräte, inkl. Kontrolle (STK, Vollständigkeit, Funktion)	2 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

Nierenschale

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O

Pappe	Nach Gebrauch		Im Ausguss entleeren und im Hausmüll entsorgen	X	
Plaste/ Chromstahl	Nach Gebrauch	Steckbeckenautomat (Topfmaschine)	Thermische Desinfektion	X	

Notfallrucksack/-Schublade

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
	nach Gebrauch	Allzweckreiniger	Reinigen		X	
inkl. Kontrolle	1 x monatlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

Paravan (Trennwand)

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Inkl. Räder	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

Schränke Anästhesie

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O

Materialschränke	2 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
Büroschränke	1 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	

Spender

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Handseife, Creme, Händedesinfektionsmittel	1 x täglich	Allzweckreiniger	Äusserlich reinigen		X
	Bei Pumpenstörung	Warmes Wasser	Pumpenkopf ausbauen und durchspülen		X

Stauschlauch

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Stauschlauch	Bei Verschmutzung	Steckbeckenautomat (Topfmaschine) oder Flächendesinfektionsmittel	Thermische Desinfektion Wischdesinfektion	X	

Stethoskop

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O

Stethoskop	Nach Gebrauch	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen oder Händedesinfektionsmittel	Wischdesinfizieren	X	
------------	---------------	---	--------------------	---	--

Tastatur

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Tastatur	1 x täglich	Allzweckreiniger	Reinigen wird keine optische Sauberkeit erreicht --> ersetzen der Tastatur	X	

Details siehe: [Tastaturen/Touchscreen Flächen in Patientenbereichen](#)

Telefon

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Tischtelefon	1 x täglich	Allzweckreiniger	Reinigen		X
Schnurlostelefon	1 x täglich oder bei Dienstwechsel	Allzweckreiniger	Reinigen	X	

Temperatursonde

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O

Sonde	Nach Gebrauch	Steckbeckenautomat (Topfmaschine)	Thermische Desinfektion	X	
Einmalhülsen	Nach Gebrauch		Entsorgen im Hausmüll	X	

Thermometer

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Digitales Ohrthermometer	Nach Gebrauch	Desinfektion Wipes für alkoholempfindliche Geräte/Oberflächen	Wischdesinfizieren	X	
Einmalhülsen	Nach Gebrauch		Entsorgen im Hausmüll	X	

Ultraschall

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O
Tastatur und Gerät	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen Kontrollliste visieren	X	

Details siehe: [Ultraschallgeräte – Handhabung und Aufbereitung SR RWS](#)

Wärmeschrank

Was	Wann	Womit	Wie	Wer	
				Pflege	B u. O

Wärmeschrank	4 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren	X	
--------------	--------------	------------------	----------	------------------------	---	--

Wäscheschrank

Was	Wann	Womit	Wie		Wer	
					Pflege	B u. O
Wäscheschrank	2 x jährlich	Allzweckreiniger	Reinigen	Kontrollliste visieren		X

Verantwortlicher Autor: André Riedel
 Erstellt am: 20.10.2014
 Letzte Änderung: 22.10.2018
 Publierte Version: 2.0.0
 Gültig für: **Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland**
 (validiert am **15.08.2016** durch **Matthias Schlegel**)